



# Instruktionsbok Behandlingsbås Majken





**Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan äventyra säkerheten.**

## Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda behandlingsbåset på rätt sätt. Innan behandlingsbåset tas i bruk skall hela instruktionen läsas igenom.

## Innehåll

<b>Förord .....</b>	<b>1</b>
<b>CE-märkning.....</b>	<b>3</b>
<b>Företagspresentation .....</b>	<b>3</b>
<b>Produktpresentation .....</b>	<b>4</b>
<b>Säkerhet.....</b>	<b>4</b>
<b>Användning.....</b>	<b>5</b>
<b>Skrotningsanvisningar .....</b>	<b>8</b>
<b>Kundservice .....</b>	<b>9</b>
<b>Garanti .....</b>	<b>10</b>

## CE-märkning

 I och med EES-avtal ställs krav på tillverkare att följa direktiv som finns upprättade för olika produktgrupper.

## Företagspresentation

BALA Agri AB är ett helsvenskt företag med omfattande produktutveckling. Vår strävan är att tillverka arbetsriktiga rationella redskap med enkla och robusta konstruktioner som har lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Är det något ni undrar över eller vill diskutera närmare, är ni alltid välkommen att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri AB. Ytterligare kontaktinformation hittar ni på baksidan av instruktionsboken.

VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL MED ER NYA BALA-PRODUKT!



## Produktpresentation

Behandlingsbåset hjälper dig att hantera och undersöka dina djur.

## Säkerhet

Allmänt

För att hälso- och säkerhetskraven ska uppfyllas får behandlingsbåset endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följs.



### **WARNING!**

**Manipulera aldrig med behandlingsbåsets funktion eller konstruktion – frånsteg äventyrar säkerheten.**

## Användning

Börja med att ställa in storleken på öppningen på behandlingsfronten med hjälp av spärren på ovansidan av behandlingsbåset. Vrid spärren mot dig för att lossa den och justera samtidigt öppningen genom att trycka trycka eller öppna stöden i dörrarna. Vrid tillbaks spärren när du har rätt storlek på öppningen för att låsa öppningen i det läge du har valt.



Lås sedan fast behandlingsfronten genom att trycka upp spaken, som sitter i mitten i övre kant på behandlingsbåset, i översta läget så att spärren låses fast.



Öppna dörren till behandlingsbåset så att djuret kan gå in. Detta gör du genom att du lyfter på haken så att spärren släpper och öppna dörren.



Stäng dörren när djuret är på plats. Om du har ett mindre djur eller om djuret inte vill gå framåt kan du använda dig av påfösningsstången. Det finns fasta lägen där du kan lägga påfösningsstången.



För att behandla klövarna på djuret – öppna sidorna. Detta görs genom att du lyfter upp handtaget och drar dörren mot dig.



Vill man komma åt och behandla djurets hals så man kan enkelt göra detta genom att lyfta på spärren på dörren i behandlingsfronten så att man kan öppna den inre delen av behandlingsfronten.



För lättare åtkomst av djurets huvud kan du även öppna upp den främre delen av behandlingsfonten.



När du vill släppa lös djuret– dra spaken bakåt så att behandlingsfronten öppnar sig. Djuret kan nu röra sig framåt i behandlingsbåset.



För att släppa ut djuret ur behandlingsbåset – öppna den bakre dörren genom att lyfta i handtaget så att spärren släpper och du kan öppna dörren.

När djuret har gått ur behandlingsbåset – stäng den bakre dörren och lås fast behandlingsfronten. Behandlingsbåset är nu redo att användas igen.



## Skrotningsanvisningar

Vid eventuell skrotning av behandlingsbåset eller delar från behandlingsbåset skall materialet demonteras, sorteras och lämnas för återvinning eller destruktion på av kommun härför avsedd plats.



## Kundservice

Ni är alltid välkomna att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri om ni har synpunkter eller frågor om våra produkter.

Så här kontaktar ni oss på BALA Agri:

Adress:

BALA Agri AB

Stallgatan 2

465 30 NOSSEBRO

Telefon 0512-295 50

Telefax 0512-811 91

E-post [info@balaagri.se](mailto:info@balaagri.se)

Hemsida [www.balaagri.se](http://www.balaagri.se)

I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

## Garanti

Bala Agri lämnar 1 års garanti på lantbruksprodukter. Garantitiden gäller från första inköpsdatum. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut behandlingsbåset. Garantin gäller om något hos behandlingsbåset, trots normal användning, skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:

- Normalt slitage
- Behandlingsbås som förvarats på felaktigt sätt.
- Behandlingsbås som använts på olämpligt eller felaktigt sätt.
- Behandlingsbås som har ändrats till utseende eller funktion.
- Skada på behandlingsbås orsakad genom rost, frätning, köld, brand, väta eller fukt
- Skada på behandlingsbås orsakad av bristfälligt underhåll

Vid eventuellt byte av en del som omfattas av garantin så innefattas den utbytta delen av den återstående garantiperioden. Ingen ny garantiperiod fås på den utbytta delen.

Bala Agri AB är medlemmar i MBR, Maskinbranschens riksförbund.

Bala Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden  
Telefon 0512-29550 • Telefax 0512-81191

E-mail: [info@balaagri.se](mailto:info@balaagri.se)

Webb: [www.balaagri.se](http://www.balaagri.se)

E-mail: [order@balaagri.se](mailto:order@balaagri.se) (gäller endast återförsäljare)



I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller tillverkaren sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktioner och specifikationer. Alla fakta avser produkter i svenskt utförande.

Tryckt och producerad av Bala Agri AB  
Copyright ©2024, Bala Agri