

# Instruktionsbok Verkstol





**Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan äventyra säkerheten.**

## Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda verkstolen på rätt sätt. Innan verkstolen tas i bruk skall hela instruktionen läsas igenom.

## Innehåll

<b>Förord</b> .....	1
<b>CE-märkning</b> .....	3
<b>Företagspresentation</b> .....	3
<b>Produktpresentation</b> .....	3
<b>Säkerhet</b> .....	4
<b>Användning</b> .....	5
<b>Skrotningsanvisningar</b> .....	7
<b>Kundservice</b> .....	8
<b>Garanti</b> .....	9

## CE-märkning

 I och med EES-avtal ställs krav på tillverkare att följa direktiv som finns upprättade för olika produktgrupper.

## Företagspresentation

BALA Agri AB är ett helsvenskt företag med omfattande produktutveckling. Vår strävan är att tillverka arbetsriktiga rationella redskap med enkla och robusta konstruktioner som har lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Är det något ni undrar över eller vill diskutera närmare, är ni alltid välkommen att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri AB. Ytterligare kontaktinformation hittar ni på baksidan av instruktionsboken.

VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL MED ER NYA BALA-PRODUKT!

## Produktpresentation

Verkstolen hjälper dig att verka klövarna på dina djur.

## Säkerhet

### Allmänt

För att hälso- och säkerhetskraven ska uppfyllas får verkstolen endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följs.



### **VARNING!**

**Manipulera aldrig med verkstolens funktion eller konstruktion –  
frånsteg äventyrar säkerheten.**

## Användning

Börja med att montera fast den stora manuella vinschen på behandlingsbåset där du önskar att maggördeln skall hamna.

Tryck fast ställningen och montera sedan dit den andra fästplattan och fäst samman dem med medföljande bult.



Montera fast carbinhakar i maggördel och i lyftbanden. Häng upp lyftbandet på de två krokarna som finns på vinschen och snurra ratten ett par varv så att lyftbandet låses fast.



Montera sedan dit den mindre manuella vinschen i den bakre delen av behandlingsbåset. Glöm inte att sätta dit spärrhandtaget. Du fäster vinschen med den medföljande sprinten.



Häng det bakre lyftbandet runt kroken på vinschen och snurra ratten ett par varv så att bandet fastnar.



För att montera dit fotstöden behöver du öppna sidodörrarna och den bakre dörren på behandlingsbåset. Du sätter ned fotstöden i de förmonterade hållarna som finns på behandlingsbåset. Om du vill så kan du låsa fast fotstöden med hjälp av den sprint som sitter på fotstödet. Du kan ta hjälp av det rep som sitter på fotstöden för att binda fast klövarna.



För att kunna veva ned maggördel, och det bakre lyftbandet, lyfter du spärren som håller fast ratten så att spärren släpper och rör ratten så att maggördeln/det bakre lyftbandet vevas ned.



## Skrotningsanvisningar

Vid eventuell skrotning av verkstolen eller delar från verkstolen skall materialet demonteras, sorteras och lämnas för återvinning eller destruktion på av kommun härför avsedd plats.



## Kundservice

Ni är alltid välkomna att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri om ni har synpunkter eller frågor om våra produkter.

Så här kontaktar ni oss på BALA Agri:

Adress:

BALA Agri AB

Stallgatan 2

465 30 NOSSEBRO

Telefon 0512-295 50

Telefax 0512-811 91

E-post [info@balaagri.se](mailto:info@balaagri.se)

Hemsida [www.balaagri.se](http://www.balaagri.se)

I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

## Garanti

Bala Agri lämnar 1 års garanti på lantbruksprodukter. Garantitiden gäller från första inköpsdatum. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut verkstolen. Garantin gäller om något hos verkstolen, trots normal användning, skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:

- Normalt slitage
- Verkstolen som förvarats på felaktigt sätt.
- Verkstolen som använts på olämpligt eller felaktigt sätt.
- Verkstolen som har ändrats till utseende eller funktion.
- Skada på verkstolen orsakad genom rost, frätning, köld, brand, väta eller fukt
- Skada på verkstolen orsakad av bristfälligt underhåll

Vid eventuellt byte av en del som omfattas av garantin så innefattas den utbytta delen av den återstående garantiperioden. Ingen ny garantiperiod fås på den utbytta delen.

Egna anteckningar



Bala Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden  
Telefon 0512-29550 • Telefax 0512-81191

E-mail: [info@balaagri.se](mailto:info@balaagri.se)

Webb: [www.balaagri.se](http://www.balaagri.se)

E-mail: [order@balaagri.se](mailto:order@balaagri.se) (gäller endast återförsäljare)



I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller tillverkaren sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktioner och specifikationer. Alla fakta avser produkter i svenskt utförande.

Tryckt och producerad av Bala Agri AB  
Copyright ©2024, Bala Agri